

Data wydania: luty 2013

ERHEM

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ERH 70

Aparat derotujący kończynę dolną

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.

ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany

 **POLSKI
PRODUKT**

www.erhem.pl/dzieci

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

- Nadmierna rotacja zewnętrzna lub wewnętrzna całej kończyny dolnej.
- Nadmierna rotacja stopy do wewnątrz oraz na zewnątrz
- Nadmierny wyprost/Przeprost w stawie kolanowym

DZIAŁANIE

Aparat o działaniu sprężynującym. Derotuje nadmierną rotację zewnętrzną lub wewnętrzną w stawie biodrowym oraz stopę względem podudzia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wygodny system taśm wywierając lekką kompresję na stawy oraz tułów zwiększa ilość bodźców proprioceptywnych (czucia głębokiego), które mogą wpłynąć na poprawę świadomości ruchowej, poczucia stabilnej postawy.
- Poprzez korekcję i stabilizację kończyn oraz tułowia poprawia równowagę.
- Możliwość regulacji siły taśmy derotującej kończynę.
- Zastosowany materiał jest przyjazny dla skóry pacjenta, nie powoduje podrażnień oraz nie ogranicza ruchu.
- Występuje w wersji na jedną lub obydwie kończyny.
- Aparat jest kompatybilny z ERH 69, w połączeniu z którym pełni funkcję kombinezonu zapewniającego pełną stabilizację tułowia, miednicy oraz derotację kończyn.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej pod nadzorem fizjoterapeuty.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta,

bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).

- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórными, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostżenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Kartą pomiarową gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu.
- Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Kartę można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl/dzieci

SKŁAD SUROWCOWY

Guma ortopedyczna, taśmy typu rzep-haczyki

KONSERWACJA


- Prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szcotełki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.




MOŻLIWOŚĆ DEROTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ

PRZEZ STOPĘ (ERH 70 B) LUB PRZEZ STOPĘ I KOLANO (ERH 70 A)

1. Rotacja zewnętrzna biodra i stopy
2. Rotacja wewnętrzna biodra i stopy
3. Rotacja zewnętrzna biodra, wewnętrzna stopy
4. Rotacja wewnętrzna biodra, zewnętrzna stopy

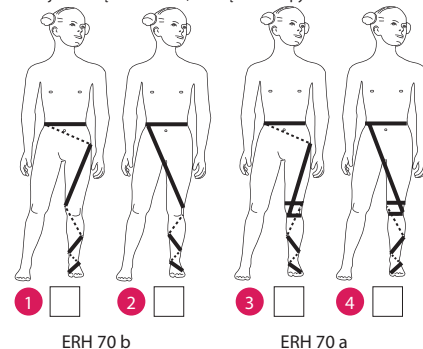

SPOSÓB ZAKŁADANIA NA STOPĘ (1) ORAZ PROWADZENIA TAŚMY DEROTUJĄCEJ (2a LUB 2b)

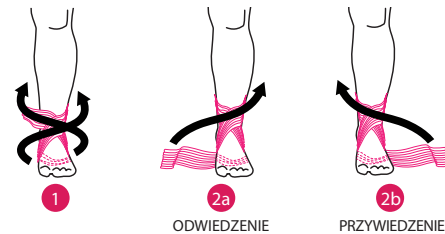

REGULACJA SIŁY DZIAŁANIA TAŚMY DEROTUJĄCEJ



Skrzyżny sposób upięcia przez pośladki ułatwia wyprost w stawie biodrowym oraz wspomaga uzyskanie pozycji wyprostowanej.