




## KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ZAKŁADANIU APARATU

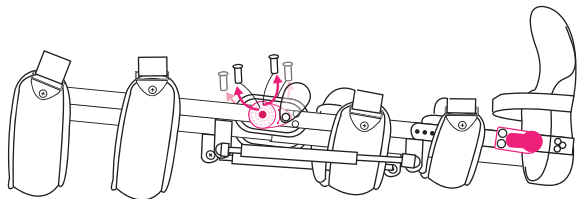


1. Wyjąć nity blokujące z zamków stawu kolanowego po obu stronach aparatu.

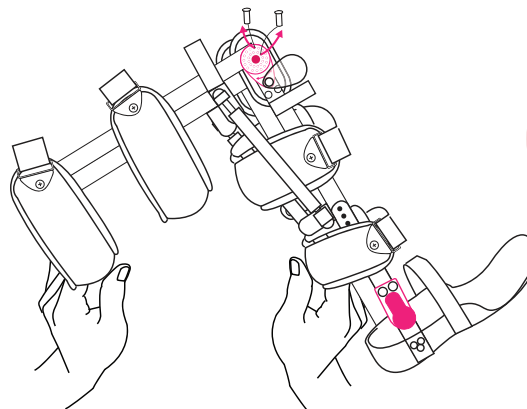


2. Łapiąc dłońmi za skrajne kabłąki, maksymalnie zgiąć aparat.

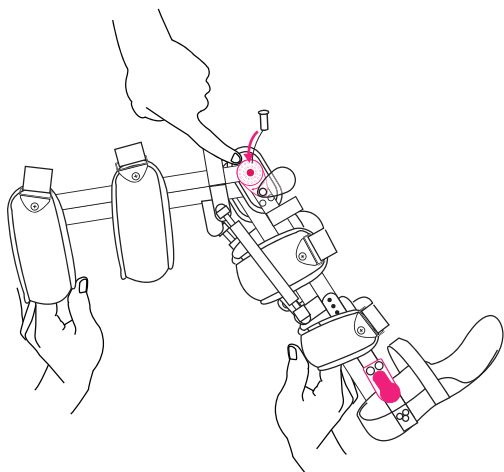


3. Górnym nitem zablokować zamek stawu tuż przy samej szynie.

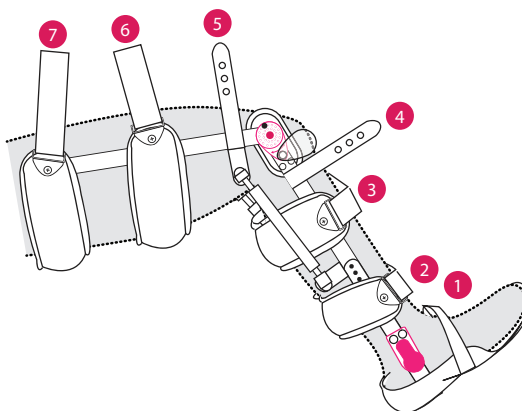

4. Aparat założyć na kończynę dolną, zapinać paski począwszy od stopy do uda.

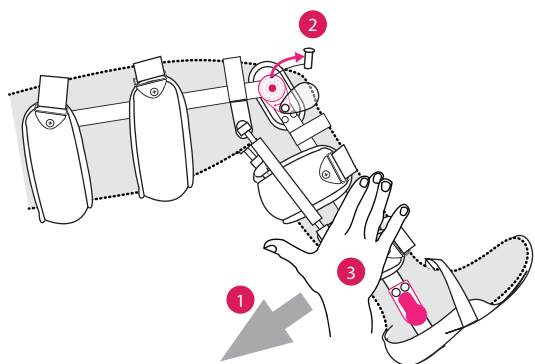

5. Asekurując kończynę w aparacie, nieznacznie zgiąć aparat i wyjąć nit blokujący. Od tego momentu aparat rozpoczyna swoją pracę, dążąc do pełnego wyprostowania.

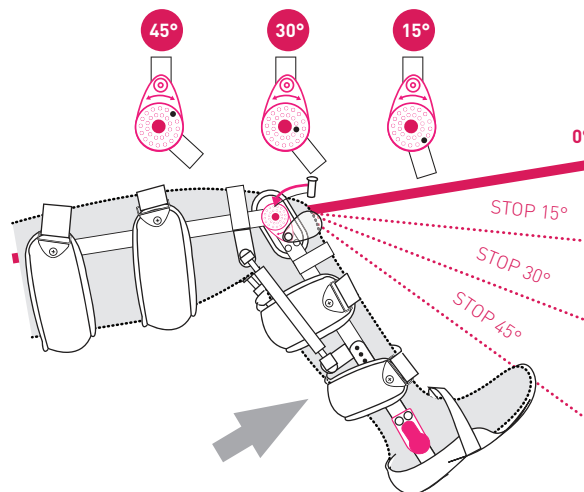

W przypadku dużych przykurczy zalecane jest stopniowe doprowadzanie do pełnego wyprostowania poprzez ograniczanie zakresu pracy mechanizmu wyprostnego nitami blokującymi po obu stronach aparatu. Ograniczenie wyprostowania aparatu powinno odbywać się w pozycjach 45°, 30°, 15°.

Dot. ERH 67/1 W przypadku dużej spastyki mięśni lub znacznych ograniczeń w stawie pochodzenia mięśniowego w pierwszych tygodniach stosowania aparatu odblokować staw skokowy pozwalając na zgięcie podeszwy stopy.