



Seria ortez przeznaczonych dla dzieci, u których w przebiegu schorzeń neurologicznych występują trudności z funkcjonalnym ustawieniem stawu nadgarstkowego oraz kciuka.

### 3 ZAŁOŻENIA TERAPII

#### 1. KOREKCJA

Właściwe ustawienie nadgarstka oraz kciuka stopniowo przywraca funkcjonalność ręki, a przede wszystkim przeciwdziała negatywnym następstwom wynikającym z niewłaściwej pozycji.

#### 2. PROPRIOCEPCJA

Trójwarstwowy materiał higromed, z którego wykonane są ortesy wywierając na staw optymalną kompresję, wspomagają jego stabilizację oraz stymulują receptory czucia głębokiego. W efekcie wzmacniają informację prawidłowego ułożenia ręki oraz czucia w przestrzeni.

#### 3. UTRWALANIE

Ortezy nie działają na zasadzie sztywnych tusek unieruchamiających, wyłączających funkcjonowanie obejmowanych stawów. Umożliwiają pacjentowi ruch w stawie przy zachowaniu ciągłej korekcji do prawidłowej pozycji.



#### ERH 38/3 A ORTEZA ODWODZĄCA KCIUK

Orteza obejmując kłęb kciuka oraz kciuk odwodzi go i stabilizuje, zapobiegając jego niewłaściwemu ustawieniu.



#### ERH 38/3 B ORTEZA ODWODZĄCA KCIUK

Orteza oprócz kłęb kciuka obejmuje również śródręcze oraz staw nadgarstkowy. Nie posiada dodatkowych usztywnień.



#### REFUNDACJA

#### ERH 38/4 A ORTEZA NADGARSTKA I KCIUKA

Orteza stabilizuje staw nadgarstkowy oraz kłęb kciuka wyprofilowaną stałką ortopedyczną z możliwością jej indywidualnego formowania.



#### REFUNDACJA

#### ERH 38/4 B ORTEZA NADGARSTKA I KCIUKA

Orteza występuje również w wersji z dodatkowym ujęciem palców, wymuszającym ich wyprost przy zachowaniu funkcji chwytnej.

NFZ 9140.18 trwała Tutor nadgarstka ERH 38/4 A

NFZ 9140.18 trwała Tutor nadgarstka ERH 38/4 B

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD ŚRÓDRĘCZA	DO 12	12 - 14	14 - 16

WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ RĘKĘ


2 WERSJE KOLORYSTYCZNE  

**ERHEM** 

## 2 SPOSOBY ZAKŁADANIA - ABY UZYSKAĆ:

### MOCNE ODWIEDZENIE KCIUKA

Po założeniu ortozy na kciuk naciągamy **górną część grzbietową** do momentu oczekiwanego odwiedzenia, po czym zapinamy boczne taśmy rzepowe.

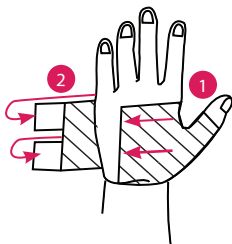

### OPOZYCJĘ, USTAWIENIE FUNKCJONALNE

Po założeniu ortozy na kciuk naciągamy **dolną część dłoniową**, po czym zapinamy boczne taśmy rzepowe.



## SPRAWDŹ TEŻ



MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO FORMOWANIA



### REFUNDACJA

#### ERH 47/1 SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ Z ODWIEDZIONYM KCIUKIEM

Szyna obejmuje staw nadgarstkowy, dłoń i palce. Daje możliwość indywidualnego formowania części dłoniowej zapewniając korekcje ustawienia dłoni i palców.

	9140.13	trwała	Łuska na dłoń i przedramię	
NFZ	9140.20	trwała	Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki	ERH 47/1

ROZMIAR	XS	S	M	L
OBWÓD NADGARSTKA	9-13	13 - 17	17 - 21	21 - 30
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	25	33	36	38
DŁUGOŚĆ NADGARSTEK -PALCE	14	17	18	19

### REFUNDACJA

#### ERH 47/2 SZYNA NA NADGARSTEK Z ODWIEDZENIEM KCIUKA

Stabilizuje staw nadgarstkowy w lekkim zgięciu grzbietowym z możliwością odwiedzenia kciuka. Bardzo lekka, dobrze akceptowalna przez dzieci.

	NFZ	9140.18	trwała	Tutor nadgarstka	ERH 47/2
--	-----	---------	--------	------------------	----------

ROZMIAR	S	M
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	15	18

# junior

ERHEM SP. J.  
ul. Puzszkina 6  
39-200 Dębica  
Tel./Fax.: (14) 681 23 85  
poczta@erhem.pl

[www.erhem.pl/dzieci](http://www.erhem.pl/dzieci)