

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puskina 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



POLSKI
PRODUKT

ERHEM



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ERH 38/3 A

Orteza odwodząca kciuk



ERH 38/3 B

Orteza odwodząca kciuk



ERH 38/4 A

Orteza nadgarstka i kciuka



ERH 38/4 B

Orteza nadgarstka i kciuka

APARAT / ORTEZA NADGARSTKA I KCIUKA
ERH 38/3 A, ERH 38/3 B, ERH 38/4 A, ERH 38/4 B

www.erhem.pl/dzieci

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

Wzmoczone napięcie mięśniowe powodujące zgięcie i przywiedzenie ustawienie nadgarstka oraz kciuka w przebiegu schorzeń neurologicznych.

3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI TERAPEUTYCZNE

KOREKCJA – właściwe ustawienie nadgarstka oraz kciuka stopniowo przywraca funkcjonalność ręki, a przede wszystkim przeciwdziała negatywnym następstwom wynikającym z niewłaściwej pozycji.

PROPRIOCEPCJA – trójwarstwowy materiał higromed, z którego wykonane są ortozy wywierając optymalną kompresję na staw, wspomaga jego stabilizację oraz stymuluje receptory czucia głębokiego. w efekcie wzmacnia informację prawidłowego ułożenia ręki oraz czucia w przestrzeni.

UTRWALANIE – ortozy nie działają na zasadzie sztywnych łusek wyłącznie unieruchamiających oraz wyłączających funkcjonowanie obejmowanych stawów. Umożliwiają pacjentowi ruch w stawie przy zachowaniu ciągłej korekcji do prawidłowej pozycji.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny, rehabilitant, fizjoterapeuta lub technik ortopeda.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, oparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz ze współistniejącymi zmianami skórными, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian

skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, oparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmoczoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.

SKŁAD SUROWCOWY

Trójwarstwowy materiał HIGROMED składający się z:

- perforowanego neoprenu wywierającego na stawy lekką kompresję, zapewniającego terapeutyczne ciepło oraz trwałość i elastyczność wyrobu
- pianki poliuretanowej
- naturalnej tkaniny bawełnianej


Szyna modeli ERH 38/4 A, ERH 38/4 B ze stali nierdzewnej, taśmy typu rzep-haczyk.

KONSERWACJA

Prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać. Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła



2 SPOSOBY ZAKŁADANIA - ABY UZYSKAĆ:

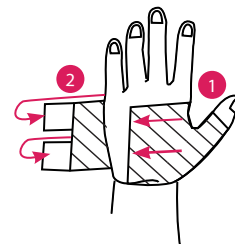

MOCNE ODWIEDZENIE KCIUKA:

Po założeniu ortozy na kciuk naciągamy górną część grzbietową do momentu oczekiwanego odwiedzenia, po czym zapinamy boczne taśmy rzepowe.



POPOZYCJE, USTAWIENIE FUNKCJONALNE:

Po założeniu ortozy na kciuk naciągamy dolną część dłoniową, po czym zapinamy boczne taśmy rzepowe.