

## WYTWÓRCA

**ERHEM SP. J.**  
ul. Puzszkina 6  
39-200 Dębica  
Tel./Fax.: (14) 681 23 85  
poczta@erhem.pl



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany

## CE

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**ERH 42**

Orteza stawu łokciowego



**ERH 42/1**

Aparat na przedramię i ramię szynowo -  
opaskowy



**ERH 56**

Aparat na ramię i przedramię



**ERH 56/1**

Aparat na ramię i przedramię redresujący  
staw łokciowy



APARAT / ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO - ERH 42, ERH 42/1, ERH 56, ERH 56/1

## ZASTOSOWANIE

- Pourazowe ograniczenia w stawie łokciowym wymagające redresji
- Złamanie i urazy wymagające unieruchomienia w określonej pozycji
- Przeprost w stawie łokciowym
- Niestabilność stawu
- Ból w okolicy stawu

## DZIAŁANIE

ERH 42; ERH 42/1; ERH 56; ERH 56/1

Stabilizują bocznie staw łokciowy z możliwością jego unieruchamienia lub zmianą zakresu ruchu.

ERH 56; ERH 56/1

Dodatkowo unieruchamiają staw nadgarstkowy oraz rękę.

## WŁAŚCIWOŚCI

ERH 42; ERH 42/1; ERH 56; ERH 56/1

- Dwie szyny boczne z ruchomym przegubem umożliwiają regulację zakresu ruchu w stawie.
- Regulacja zakresu ruchu umożliwia redresję w stawie lub unieruchomienie kończyny w określonej pozycji.
- Miękkie taśmy dociągowe zapewniają anatomiczne dopasowanie oraz regulację poziomu kompresji.

ERH 56; ERH 56/1

Część dłoniowa daje możliwość indywidualnego formowania zapewniając korekcję ustawienia dłoni i palców.

ERH 56/1

Aparat wyposażony jest w pneumatyczny mechanizm wyprostny stawu powodujący ciągły oraz płynny ruch rozciągania przykurczonych mięśni zginających staw łokciowy.

## UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia (kąąt zgięcia i wyprostów szyn bocznych)

jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.

- Skóra w miejscu przylegania ortezy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania nitami blokującymi.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na [www.erhem.pl](http://www.erhem.pl)

## SKŁAD SUROWCOWY

Pianka poliuretanowa wewnętrznie pokryta bawełnianą dzianiną frotte, od zewnątrz poliamidową dzianiną welurową, taśmy typu rzep-haczyk, klamerki, boczne szyny aluminiowe, słownik gazowy, tworzywo sztuczne PE.

## KONSERWACJA

- Miękkie elementy prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

