

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puskina 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany



**POLSKI
PRODUKT**

www.erhem.pl/dzieci

ERHEM



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ERH 67

Apat szynowy - opaskowy
na całą kończynę dolną
z sandałem



ERH 43/2

Aparat modułowy otwarty
na całą kończynę dolną
z sandałem



ERH 45/1

Tutor na całą kończynę dolną



ERH 45/2

Dziecięca orteza na całą kończynę
dolną korygująca szpawatość lub
koślawość varus/valgus

APARAT / ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
ERH 67, ERH 43/2, ERH 45/1, ERH 45/2

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony dla pacjentów z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.

Niedowład i porażenie mięśni kolana i stopy w przebiegu:

- Stwardnienia rozsianego,
- Poliomyelitis,
- Udaru mózgu,
- Pourazowego uszkodzenia mózgu,
- MPDz,
- Przepukliny oponowo rdzeniowej,
- Złamań i ich powikłań.

DZIAŁANIE

• Stabilizują całą kończynę dolną oraz korygują ustawienie osiowe stawów.

WŁAŚCIWOŚCI

Aparaty o konstrukcji dwuszynowej.

Taśmy dociągowe gwarantują stabilność zapięcia oraz umożliwiają ustalenie indywidualnej kompresji.

ERH 67; ERH 43/2

Ruchome przeguby stawu kolanowego zapewniają stabilizację boczno przysiodkową z możliwością ograniczania zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.

- Przeguby stawu skokowego występują w wersji z możliwością ruchu zgięcia:
 - grzbietowego z możliwością całkowitego zablokowania ruchu,
 - grzbietowego z podszewkowego z możliwością całkowitego zablokowania ruchu.

ERH 67; ERH 43/2; ERH 45/1

- Część stopowa wykonana z elastycznego tworzywa obejmującego całą lub 3/4 stopy ogranicza jej supinację i pronację.
- Taśmy w przodostopiu oraz na wysokości stępu umożliwiają

właściwe ułożenie pięty w aparacie.

- Aparaty dostosowane są do noszenia w obuwiu.

ERH 45/1

- Dodatkowa wyprofilowana stalka w osi długiej, tylnej części aparatu wspomaga unieruchomienie w wyproście.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktaż zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktów i sposób ustawienia (kąt zgięcia i wyprostu szyn bocznych) jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania nitami blokującymi.
- Kąt zgięcia i wyprostu dobierany i ustawiany jest tylko przez

lekarza lub wyspecjalizowany personel medyczny.

- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pognięte, wyszczerbione.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY

Pianka poliuretanowa wewnętrznie pokryta bawełnianą dzianiną frotte, od zewnątrz poliamidową dzianiną welurową, taśmy typu rzep-haczyk, klamerki, boczne szyny aluminiowe. Tworzy stopowa: tworzywo sztuczne PE, PP, zamknięto komórkowa pianka poliuretanowa.

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używamy delikatnych detergentów oraz dokładnie spłukujemy wodą.

