

Data wydania: 01.2018

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzenie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany




www.erhem.pl/dzieci

ERHEM

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

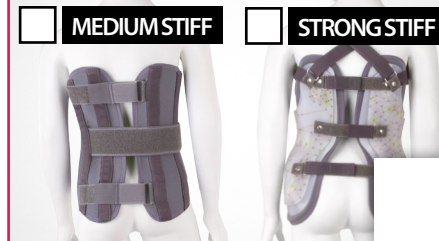

ERH 48/3

Dziecięcy gorset doniczkowy piersiowo-łędźwiowo-krzyżowy



ERH 69

Dziecięca wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

ORTEZA GORSETOWA TUŁOWIA - ERH 48/3, ERH 69

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

- Niepełna stabilizacja tułowia oraz miednicy w przebiegu: MPDz, dystrofia mięśniowej, przepukliny oponoworodzeniowej
- Boczne skrzywienia kręgosłupa
- Nadmierna Kifoza / Lordoza
- Stan po zabiegach ortopedycznych w obrębie kręgosłupa
- Choroba Scheuermanna

DZIAŁANIE

- Stabilizują i odciążają obejmowany odcinek kręgosłupa oraz przejście lędźwiowo-krzyżowe.
- Korygują nadmierne pogłębienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.
- Wywierając lekką kompresję na tułów zwiększają poczucia stabilnej postawy oraz świadomości ruchowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ortezy wzmocnione są wyprofilowanymi metalowymi fiszbiniami z możliwością indywidualnego formowania poprzez doginanie.
- Boczne taśmy dociągowe umożliwiają regulację poziomu stabilizacji oraz ustalenie indywidualnej kompresji ortez.
- Elastyczny i przewiewny materiał zapewnia dobrą wentylację oraz optymalną kompresję.
- Anatomiczny kształt ortez zapewnia komfort użytkowania.

ERH69

W celu optymalnego dopasowania produktu do wzrostu pacjenta, orteza składa się z dwóch niezależnych części: części brzusznej oraz części grzbietowej.

ERH48/3

Składa się z dwóch połówek zapinanych z przodu i z tyłu opierających się na talerzach biodrowych.

UWAGI ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktaż zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Długotrwałe stosowanie ortozy może doprowadzić do osłabienia lub zaniku mięśni obejmowanej okolicy, dlatego zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej pod nadzorem fizjoterapeuty.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza

prowadzącego.

- Zaleca się stosowanie produktu na koszulkę bawełnianą.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl/dzieci

SKŁAD SUROWCOWY

Guma ortopedyczna. Metalowe fiszbiny ze stali nierdzewnej. Taśmy Velcro.

KONSERWACJA

- Przed praniem usunąć elementy metalowe.
- Prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.



SPOSÓB PROWADZENIA TAŚM KORYGUJĄCO-DOCIĄGOWYCH W PRZYPADKU SKRZYWIEN KRĘGOSŁUPA

