

Data wydania: 12.2017

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



www.erhem.pl/dzieci

ERHEM

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



STARTER



REGULAR



noke
SYSTEM

ERH 49/5

Tutor unieruchamiająco-korygujący stopę i staw skokowy

APARAT / ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA - ERH49/5

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

- Zniekształcenia stawu skokowego i przodostopia
- Niestabilność i skręcenia stawu
- Naciągnięcia i naderwania w obrębie aparatu więzadłowego

DZIAŁANIE

System taśm krzyżowych oraz bocznych usztywnień stabilizuje staw skokowy oraz koryguje jego osiowe ustawienie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Regulacja długości taśm krzyżowych umożliwia zmianę stopnia unieruchomienia oraz korekcyj.
- Wyposażona w wyprofilowane łuski stabilizujące oraz korygujące bocznie przysiodkowo staw skokowy oraz stopę.
- Orteza o działaniu statycznym, spoczynkowym
- Możliwość odpięcia wewnętrznego wymięczenia w celu utrzymania higieny

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologii, neurologii.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz ze współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- w przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli

i maści rozgrzewających.

- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości, związane ze wzmogoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl/dzieci

SKŁAD SUROWCOWY

Tworzywo sztuczne PE, pianka poliuretanowa pokryta zewnętrzną dzianiną welurową, od wewnątrz bawełnianą tkaniną frotte, taśmy bawełniane, taśmy typu rzep-haczyk, klamerki.

KONSERWACJA

- Przed praniem usunąć elementy stabilizujące.
- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

