

# ERHEM

## WYTWÓRCA

**ERHEM SP. J.**  
ul. Puszkina 6  
39-200 Dębica  
Tel./Fax.: (14) 681 23 85  
poczta@erhem.pl



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany

## CE

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**ERH 54**

Temblak dwuczęściowy



**ERH 57**

Temblak dwuczęściowy z unieruchomieniem



APARAT / ORTEZA STAWU BARKOWEGO - ERH 54, ERH 57

[www.erhem.pl](http://www.erhem.pl)

## ORTOTYKA KOŃCZYN GÓRNYCH

## ZASTOSOWANIE

- Złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej
- Nawykowe zwichnięcia i zespoły bólowe w obrębie barku
- Dolezanie uszkodzeń stożka rotatorów
- Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
- Niedowłady i porażenia mięśni w przebiegu chorób neurologicznych
- Stany zapalne w obrębie barku i łokcia
- Urazy splotu ramiennego

## DZIAŁANIE

- Stabilizują i odciążają kończynę górną oraz obręcz barkową.
- Zapewniają repozycję głowy kości ramiennej.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Temblaki cechuje prosta konstrukcja oraz łatwość stosowania.
- Dodatkowe usztywnienia wykonane z miękkiej płyty zapobiegają niepożądanym przemieszczeniom kończyny.
- System szelek skutecznie odciąża obręcz barkową, nie powodując przeciążeń i przesień w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa.

## ERH 57

Dodatkowy pas okalający klatkę piersiową doskonale wiąże bark z ramieniem unieruchamiając kończynę górną przy tułowiu.

## UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Długotrwałe stosowanie ortozy może doprowadzić do osłabienia lub zaniku mięśni obejmowanej okolicy, dlatego zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej pod nadzorem fizjoterapeuty.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Zaleca się stosowanie produktu na koszulkę bawełnianą.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami

skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.

- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmogoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na [www.erhem.pl](http://www.erhem.pl)

## SKŁAD SUROWCOWY

Pianka poliuretanowa wewnętrznie pokryta bawełnianą dzianiną frotte, od zewnątrz poliamidową dzianiną welurową. Usztywnienia z płyty PE, szelki z taśmy kaletniczej.

## KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

