

Data wydania: 12.2017

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.

ul. Puszkina 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



www.erhem.pl/dzieci

ERHEM

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ERH 66/2 STEP TO

Aparat stabilizująco-odwodzący staw biodrowy z regulacją zgięcia i wyprostów

APARAT / ORTEZA BIODRA - ERH 66/2

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

Orteza przeznaczona jest dla pacjentów ze wzmogoną lub spastyczną pracą przywodzicieli stawu biodrowego, która powoduje chód szczyrkowy w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego oraz wtrótnie może prowadzić do podwichnięcia lub całkowitego zwichnięcia stawu.

- Diplegia spastyczna
- Quadriplegia spastyczna
- Podwichnięcie / zwichnięcie stawu biodrowego

WŁAŚCIWOŚCI

- Mechanizm łączący mankiety udowe zapewnia stabilizację stawu biodrowego w optymalnym odwiedzeniu. Utrzymuje właściwą długość mięśni przywodzących kończynę, nie doprowadzając do ich przykurcu.
- Umożliwia fizjologiczny naprężenienny ruch kończyn podczas chodu, z możliwością regulacji zakresu zgięcia i wyprostu w stawie.
- Orteza obejmuje przyśrodkowe części ud, rozpoczyna się na wysokości pachwin a kończy się na wysokości stawu kolanowego.
- Regulacja obwodowa odbywa się poprzez taśmy rzepowe.
- Taśmy pośladkowe, pasa biodrowego posiadają możliwość zapinania na dwa sposoby wspomagając pracę mięśni pośladkowych.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktów i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, oparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórными, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka

konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, oparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmogoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.

- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy strony nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY


- Wymiękczenie: Pianka poliuretanowa wewnętrznie pokryta bawełnianą dzianiną frotte, od zewnątrz poliamidową dzianiną welurową, taśmy typu rzep-haczyk
- Elementy nośne aparatu stalowe,
- Peloty udowe z tworzywa sztucznego PE.

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczteteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używamy delikatnych detergentów oraz dokładnie splukujemy wodą.



2 SPOSOBY ZAKŁADANIA TAŚM POŚLADKOWYCH

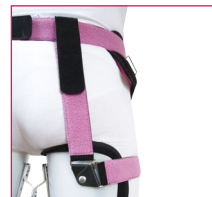

REGULACJA ZAKRESU ZGIĘCIA I WYPROSTU



- 1 Odchyl materiał wymiękczający wewnątrz mankiety udowego.
- 2 Wykręć blokadę regulującą / pełny zakres zgięcia i wyprostu
- 3 Wkręć blokadę w pozycję określającą zakres ruchu.
- 4 Powtórz czynności przy drugim mankiecie.