

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ERH 67/2

Aparat szynowy - opaskowy na całą
kończynę dolną z sandałem



ERH 43/2

Aparat modułowy otwarty na całą
kończynę dolną z sandałem



APARAT / ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ - ERH 67/2, ERH 43/2

ZASTOSOWANIE

- Przeznaczony dla pacjentów z dysfunkcjami w obrębie kończyny dolnej o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.
- Niedowład i porażenie mięśni kolana i stopy w przebiegu:
- Stwardnienia rozsianego
- Udaru mózgu
- Pourazowego uszkodzenia mózgu
- Złamań i ich powikłań
- MPDz
- Przepukliny oponowo-rdzeniowej
- Poliomyelitis

DZIAŁANIE

Stabilizują całą kończynę dolną oraz korygują ustawienie osiowe stawów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Aparaty o konstrukcji dwuszynowej.
- Dzięki regulowanym pasom zaciskowym możliwe jest dokładne dopasowanie do obwodu kończyny.
- Ruchome przeguby stawu kolanowego zapewniają stabilizację boczno-przyśrodkową z możliwością ograniczania zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.
- Przeguby stawu skokowego występują w wersji z możliwością ruchu zgięcia:
 - grzbietowego z możliwością całkowitego zablokowania ruchu
 - grzbietowego i podeszwowego z możliwością całkowitego zablokowania ruchu
- Część stopowa wykonana z elastycznego tworzywa obejmującego całą lub 3/4 stopy ogranicza jej supinację i pronację.
- Taśmy w przodostopiu oraz na wysokości stępu umożliwiają właściwe ułożenie pięty w aparacie.
- Aparaty dostosowane są do noszenia w obuwiu.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia (kąta zgięcia i wyprostu szyn bocznych) jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, oparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).

- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmoczoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach, oraz dokładnego blokowania nitami blokującymi.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl

SKŁAD SUROWCOWY

Pianka poliuretanowa wewnętrznie pokryta bawełnianą dzianiną frotte, od zewnątrz poliamidową dzianiną welurową, taśmy typu rzep-haczyk, klamerki, boczne szyny aluminiowe. Część stopowa: tworzywo sztuczne PE, PP, zamknięto komórkowa pianka poliuretanowa.

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem , za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów oraz dokładnie splukiwać wodą.

