

Data wydania: 01.2018

WYTWÓRCA

ERHEM SP. J.
ul. Puszkińska 6
39-200 Dębica
Tel./Fax.: (14) 681 23 85
poczta@erhem.pl



Zarządzenie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



www.erhem.pl/dzieci

ERHEM

CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



ORTHO



ERH 71

Aparat tulejkowy na podudzie z sandałem

APARAT / ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
ERH 71

ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE

- Aparat przeznaczony dla pacjentów z zaburzeniami chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego i obwodowego układu nerwowego.
- Wiotki i spastyczny niedowład stopy.
- Brak lub osłabienie zgięcia grzbietowego stopy.
- Porażenie nerwu strzałkowego.
- Niestabilność, deformacje i zaburzenia osi stawu.
- Deficyt wyprostowania stawu kolanowego – ERH 71/1.

DZIAŁANIE

Aparaty stabilizują stopę oraz staw skokowy względem podudzia.

WŁAŚCIWOŚCI

ERH 71; ERH 71/1

- Elastyczna część stopowa obejmująca całą lub 3/4 stopy, wyposażona jest w wyprofilowany łuk podłużny oraz wmiękczenie.
- Ograniczają supinację i pronację stopy oraz dynamicznie przywracają ją do pozycji pośredniej podczas ruchu.
- Dostosowane do noszenia w obuwiu.

ERH 71/1

- Poprzez podparcie podzespokowe aparat zapewnia bierny wyprost oraz stabilizację stawu kolanowego u osób z deficytem wyprostowania przy jednoczesnym ustawieniu stopy w pozycji pośredniej (kąt 90°).

ERH 71

- Występuje bez lub z ruchomym zamkiem stawu skokowego z możliwością ruchu zgięcia: grzbietowego, podszewowego lub zachowania obydwu tych ruchów.

UWAGI I ZALECENIA

- Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, reumatologa, neurologa.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).

- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórными, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmoczoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany pod względem rozmiaru.
- Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu. Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
- Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu na www.erhem.pl/dzici

SKŁAD SUROWCOWY

Część stopowa:

tworzywo sztuczne PE, zamknięto komórkowa pianka poliuretanowa, konstrukcja oraz szyny boczne aluminiowe, taśmy typu rzep-haczyk.

Obszycie:

pianka poliuretanowa pokryta zewnętrznie poliamidową dzianiną welurową, od wewnątrz bawełnianą dzianiną frotte,

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

