

## Instrukcja Użytkowania

### ERH 35/2 ANTIHYPEREXTENSION

Dziecięca orteza korygująca przeprost stawu kolanowego



#### PRZEZNACZENIE

Orteza przeznaczona jest dla pacjentów z zaburzeniami chodu przebiegającymi z przeprostem stawu kolanowego. Nasilenie dysfunkcji w stopni lekkim oraz średnim.

#### ZASTOSOWANIE

- Przeprost stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego.
- Niestabilność poboczna stawu kolanowego potężona z przeprostem stawu.

#### DZIAŁANIE

- Stabilizuje staw kolanowy.
- Koryguje ustawienie stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej.
- Zapobiega przeprostowi stawu kolanowego.
- Uniemożliwia uciekanie podudzia ku tyłowi.



Orteza wykonana jest w formie otwartej - pozwala to na regulację obwodu oraz łatwy i szybki sposób jej zakładania i zdejmowania.

Poboczne szyny wykonane są z bardzo cienkiej i elastycznej stali hartowanej z ruchomym zawiasem w stawie.



Zmiana długości skrzyżnych taśm podkolanowych, zwiększa działanie korekcyjne ortezy.

## **UWAGI I ZALECENIA:**

- Ortezę należy zakładać, zdejmować i obsługiwać według indywidualnie udzielonych instrukcji. Stosować zgodnie z przeznaczeniem wg. zaleceń i nadzorem lekarza specjalisty.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jego elementów stabilizujących, unieruchamiających, korygujących lub odciążających jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji oraz właściwej pielęgnacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy zaprzestać stosowania środka ortotycznego, skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny .
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania elementami blokującymi.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- W przypadku uszkodzenia lub jakiegokolwiek usterki należy zaprzestać korzystania oraz skontaktować się z punktem wydającym środek ortotyczny lub wytwórcą.
- Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw lub modernizacji.

## **KONSERWACJA**

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Taśmy materiałowe oraz rzepy szczotkować szczotką do ubrań oraz odkurzać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów lub wody z mydłem, dokładnie sputkiwać oraz osuszyć za pomocą szmatki lub gąbki.
- Elementy metalowe wycierać suchą szmatką