

## Instrukcja Użytkowania

### **ERH 45/2 VARUS/VALGUS**

Dziecięca orteza na całą kończynę dolną korygująca koślawość lub szpotawość




#### **PRZEZNACZENIE**

- Orteza do stosowania dziennego lub nocnego.
- Przeznaczona do korekcji osi stawu kolanowego oraz podudzia.

#### **ZASTOSOWANIE**

- Koślawość lub szpotawość kolan.
- Choroba Blounta/piszczel szpotawa.

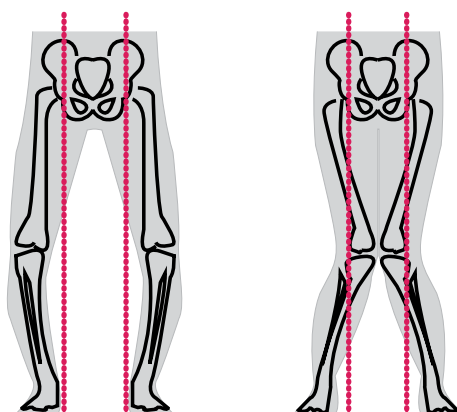

**WERSJA VARUS**

*Korekcja szpotawości.*

**WERSJA VALGUS**

*Korekcja koślawości.*

Po zainstalowaniu ortezy na kończynie dolnej pelota korygująca powinna znajdować się:

1. W przypadku korekcji koślawości od wewnętrznej strony kolana, natomiast w przypadku szpotawości po zewnętrznej stronie kolana.
2. Taśmy dociągowe peloty korygującej umożliwiają regulację siły działania korekcyjnego.
3. Orteza posiada możliwość regulacji swojej długości poprzez wykręcenie śrub w górnej części, zmianę długości i ponowne ich dokręcenie.

## **UWAGI I ZALECENIA:**

- Ortezę należy zakładać, zdejmować i obsługiwać według indywidualnie udzielonych instrukcji. Stosować zgodnie z przeznaczeniem wg. zaleceń i nadzorem lekarza specjalisty.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jego elementów stabilizujących, unieruchamiających, korygujących lub odciążających jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji oraz właściwej pielęgnacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórných należy zaprzestać stosowania środka ortotycznego, skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny .
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania elementami blokującymi.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
- W przypadku uszkodzenia lub jakiegokolwiek usterki należy zaprzestać korzystania oraz skontaktować się z punktem wydającym środek ortotyczny lub wytwórcą.
- Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw lub modernizacji.

## **KONSERWACJA**

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Taśmy materiałowe oraz rzepy szczotkować szczotką do ubrań oraz odkurzać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów lub wody z mydłem, dokładnie sputkiwać oraz osuszyć za pomocą szmatki lub gąbki.
- Do elementów skórzanych stosować środki do konserwacji skór naturalnych oraz wycierać suchą szmatką
- Elementy metalowe wycierać suchą szmatką