

Instrukcja Użytkowania

ERH 66/4 V CONTOUR

Orteza stabilizująco-odwodząca stawy biodrowe



PRZEZNACZENIE

- Orteza przeznaczona jest dla dzieci z deficytami neurologicznymi oraz innymi jednostkami chorobowymi.
- Ma na celu poprawę stabilizacji w obrębie miednicy oraz korekcję ustawienia kończyn dolnych w stawach biodrowych.
- Przeznaczona jest dla pacjentów zarówno ze wzmożonym oraz niskim napięciem mięśniowym.
- Zapobiega spastycznej pracy przywodzicieli

ZASTOSOWANIE

- Diplegia spastyczna
- Quadriplegia spastyczna
- Mózgowe porażenie dziecięce
- Spina bifida/przepuklina oponowo-rdzeniowa
- Podwichnięcia/zwichnięcie stawu biodrowego.
- Wrodzona dysplazja stawów biodrowych.

DZIAŁANIE

- Stabilizuje tułów i miednicę
- Wspomaga pracę mięśni brzucha oraz mięśni pośladkowych
- Koryguje nadmierną rotację wewnętrzną kończyn dolnych
- Umożliwia repozycję ustawienia kończyn dolnych
- Ułatwia wygodną i bezpieczną pozycję.

WŁAŚCIWOŚCI

- Orteza po zewnętrznych brzegach wykonywana jest w formie otwartej umożliwia wygodne zakładanie oraz regulowanie indywidualnej kompresji.
- Regulacja długości taśm w części pośladkowej wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie siły działania taśmy rotującej.
- Orteza posiada elastyczne usztywnienie od wewnętrznej strony ud, które dynamicznie odwodzi kończyny lub pozycjonuje je w określonej pozycji.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA

Ortezę należy zakładać w pozycji leżącej.

1. Odepnij 2 taśmy rotujące (A).
2. Odepnij rzepy regulujące obwód ortezy po zewnętrznej krawędzi (B).
3. Otwartą ortezę utóż na leżance.
4. Połóż pacjenta na ortezie tak aby V-kontur znajdował się między udami.
5. Zapnij mankiety udowe oraz brzuszne obracając kolejno pacjenta na bok w prawą i lewą stronę.
6. Dopnij 2 taśmy rotujące.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Ortezę należy zakładać, zdejmować i obsługiwać według indywidualnie udzielonych instrukcji. Stosować zgodnie z przeznaczeniem wg. zaleceń i nadzorem lekarza specjalisty.
- Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
- Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jego elementów stabilizujących, unieruchamiających, korygujących lub odciążających jest ściśle związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany przez lekarza prowadzącego.
- Skóra w miejscu przylegania ortozy powinna być sucha i czysta, bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, zmiany troficzne, egzemy).
- W przypadku konieczności stosowania produktu wraz z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę należy poddać szczególnej obserwacji oraz właściwej pielęgnacji.
- W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy zaprzestać stosowania środka ortotycznego, skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny.
- Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli i maści rozgrzewających.
- Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków konserwujących i piorących może spowodować otarcia, odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością na zastosowane środki piorące.
- W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny .
- Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania elementami blokującymi.
- Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pocięte, wyszczerbione.
- W przypadku uszkodzenia lub jakiegokolwiek usterki należy zaprzestać korzystania oraz skontaktować się z punktem wydającym środek ortotyczny lub wytwórcą.
- Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw lub modernizacji.

KONSERWACJA

- Elementy miękkie prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
- Taśmy materiałowe oraz rzepy szczotkować szczotką do ubrań oraz odkurzać.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
- Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów lub wody z mydłem, dokładnie sputkiwać oraz osuszyć za pomocą szmatki lub gąbki.
- Do elementów skórzanych stosować środki do konserwacji skór naturalnych oraz wycierać suchą szmatką
- Elementy metalowe wycierać suchą szmatką



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania wewnątrz opakowania.



Wyrób medyczny



Opakowanie należy wyrzucić do kosza.



Opakowanie nadaje się do recyklingu.
